

Was bedeuten die Anzeigen?



Wenn du schwanger werden möchtest:



Sex



Sex



Sex



Wenn du **nicht** schwanger werden möchtest:



Sex



Sex



Sex



Siehe www.daysy.me/tutorials für weitere Videos zur Erklärung.



Das **violette Licht blinkt**, wenn *daysy* auf deine Menstruationseingabe wartet. Bestätige Menstruation, indem du die Aktivierungstaste 2 Sekunden gedrückt hältst.



Das **violette Licht leuchtet konstant**, wenn du die Menstruation bestätigt hast. Falls du aus versehen Menstruation eingegeben hast, halte die Aktivierungstaste 2 Sekunden gedrückt, um das Licht auszustellen.



Im **Uhrzeigersinn leuchtendes blaues Licht** bedeutet, dass gerade eine Messung durchgeführt wird. Abbruch: durch Drücken der Taste für 2 Sekunden.